

Detergente para Spincell 5 IVD

USO PREVISTO

El detergente se utiliza con un analizador compatible para el mantenimiento diario, del sistema de flujo y la limpieza de la aguja.

FUNCIONES

Con las funciones de emulsión y catálisis, el Detergente emulsiona la grasa, resuspende restos solidificados y transforma las proteínas en aminoácidos solubles en agua para mantener la limpieza de los tubos y de las células de flujo. Con una humidificación efectiva, también elimina las burbujas en todo el sistema de flujo proporcionando un rendimiento de trabajo normal. El Detergente no teñirá ni corromperá los tubos ni acortará la vida útil del instrumento.

INGREDIENTES

Solución conservante	2 g/L
Sulfato de cloruro	20 g/L
Solución tampón	1 g/L
Anticoagulante	1 ~ 2 g/L
Surfactante	3 g/L

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Este producto será estable durante 24 meses cuando se almacene sin abrir en un lugar oscuro evitando la luz solar. Una vez abierto, este producto deberá consumirse en un plazo de 60 días y se almacenará por debajo de 35 °C.

OPERACIONES

1. Coloque el recipiente de Detergente debajo del analizador para evitar la luz solar directa. Manténgalo alejado de la salida de aire de refrigeración o calentamiento.
2. Utilícelo a 15°C ~ 30°C.
3. Conecte el recipiente de Diluyente con el analizador de acuerdo con el Manual de Funcionamiento.



RESTRICCIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1. Utilice el reactivo bajo la dirección de un técnico profesional.
2. Asegúrese de que el reactivo coincide con su analizador. Cualquier desajuste conducirá a resultados inexactos.
3. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuague de inmediato con abundante agua y busque atención médica.
4. Evite inhalar el reactivo evaporado.
5. Enrosque correctamente la tapa del recipiente para evitar la volatilización y la contaminación.
6. Una vez abierto, desechar pasados 60 días.
7. Si el producto se ha congelado, deje que el producto llegue a la temperatura ambiente y luego invierta suavemente el producto para su completa homogeneización. Verifique el funcionamiento del reactivo antes de usarlo con muestras reales.

SÍMBOLOS EN EL ENVASE Y ETIQUETADO

 Lote  Usar antes de  Consulte las instrucciones de uso

 Limitaciones de temperatura  No reutilizar  Fabricante

 Mantener alejado de la luz solar  Fecha de fabricación

 Representante autorizado en la Comunidad Europea



URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No.4 East Alley, Jiuhua Road, Guilin, Guangxi 541001, PR China

Tel: +86(773)2288586 Fax: +86(773)2288560

Web: www.urit.com Email: service@uritest.com

Distribuidor: **SPINREACT SAU**

Ctra.Santa Coloma, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (GI) SPAIN

Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 00 99

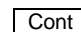
spinreact@spinreact.com



Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting

Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, UK

PRESENTACIÓN

Ref. 1705680  1 x 20 L

